


Darmkrebs früh erkennen – Test-Anleitung




1.

Vor- und Nachname sowie das Datum der Probenahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.

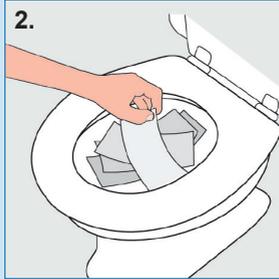

2.

Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

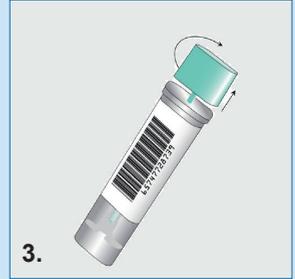


3.

Nach dem Stuhlgang das Probe-
röhrchen nehmen und die türkise
Kappe durch leichtes Drehen samt
Teststab aus dem Röhrchen ziehen.




4.

Mit der Spitze des türkisen Teststabs
an verschiedenen Stellen über die
Stuhlprobe streichen.

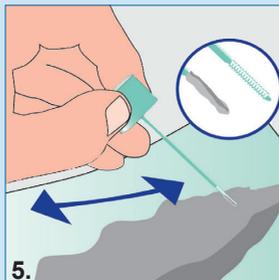


5.

Die Rillen der Spitze müssen danach
vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.

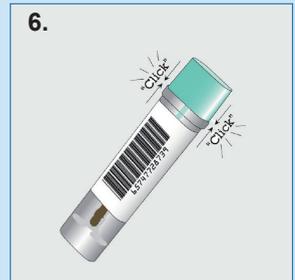


6.

Teststab in das Proberöhrchen stecken
und dieses somit verschließen.
Nach einem hörbaren „Klick“ ist das
Proberöhrchen ordentlich verschlossen.
Probenahme nicht wiederholen!

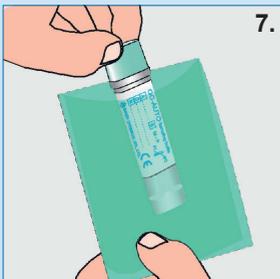

7.

Das verschlossene Proberöhrchen
kräftig schütteln. Stecken Sie es
in den grünen Beutel
und verschließen Sie diesen.

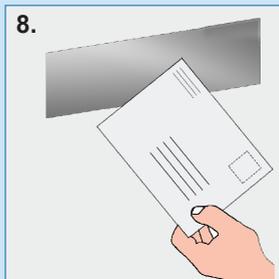

8.

Bringen Sie das Proberöhrchen so
rasch wie möglich an die ausgebende
Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe
erhöht die Probensicherheit.

Vertrieb durch:
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
23858 Reinfeld

untersuchendes Labor:
Partnerschaftspraxis für
Laboratoriumsmedizin
und Mikrobiologie
Falkestraße 1
31785 Hameln